

# BladderScan BVI 6100 簡易操作卡

儀器若是進入休眠狀態，請按下儀器上的任意鍵，啟動儀器。

## 1 選擇性別

按下性別鍵切換性別

男性：不顯示

子宮切除的女性：不顯示


女性：顯示為 



## 2 塗抹超音波傳導膠

請受測者持仰臥姿勢，使腹部肌肉放鬆。

先找到受測者恥骨，在腹部中心距離恥骨上方約三公分處塗抹足量超音波傳導膠(盡可能減少氣泡)。

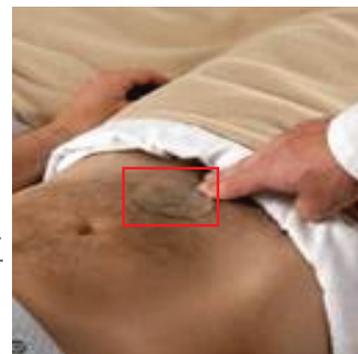

將探頭放置於傳導膠上

## 3 瞄準膀胱位置

將探頭朝向尾椎骨方向進行掃描。




瞄準膀胱位置

## 4 按下掃描鍵


## 5 顯示箭頭則須重新掃描



箭號指示

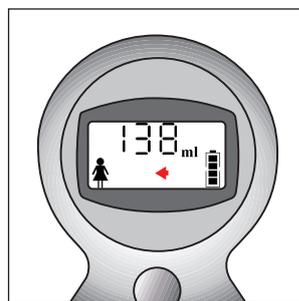

若箭號向左

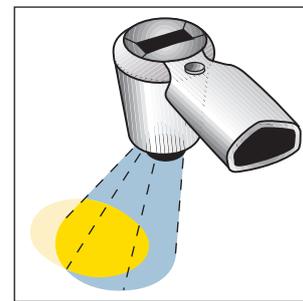

請將探頭向左微調後再重新掃描

PS.依箭頭方向調整掃描角度，重新掃描至箭頭消失

## 6 若無顯示箭頭

請於同位置同角度掃描多次，確認無出現箭頭後，取最大值作為測量結果。



無任何箭頭

## BladderScan 的使用限制

- 膀胱容量低估：病患具有相當程度疝氣(hernias)，大型憩室(diverticula)，或腸囊腫外科整形(enterocycloplasty)，其部份膀胱會超出掃瞄範圍，而無法包含在計算尿量之中。
- 膀胱容量高估：若鄰近膀胱位置有液體積聚，例如懷孕，或腹水(ascites)，卵巢的囊腫(ovarian cysts)，其液體容量會包含在計算尿量之中。
- 過度肥胖。
- 嚴重的腹部(恥骨上的)疤痕。
- 留置導尿管尚未移除前。
- 掃描部位正好有新撕裂傷口。

## BladderScanBVI 6100 簡易故障排除步驟

- 若BladderScan電力異常**  
通常因為當機後導致電力指示判斷錯誤，請使用鋁棒插入掃描鍵上方的暗孔，將儀器重新啟動後再連續充電6個小時以上在使用。
- 若BladderScan無法正常運作**  
請使用鋁棒按壓掃描鍵上方隱藏的Reset鍵，若仍然無法改善，請與態能企業有限公司聯繫。

## BladderScan的清潔步驟

- 掃描完畢後，使用濕的擦手紙，擦拭探頭表面的傳導膠。
- 再使用酒精或乾洗手液，塗抹探頭，並以棉片或紗布擦拭乾淨，完成基本消毒