


BLADDERSCAN BVI 6400 簡易操作卡

備註：儀器若是進入休眠狀態，請按下儀器上的任意鍵，進行開機

1 測量步驟

a) 選擇性別

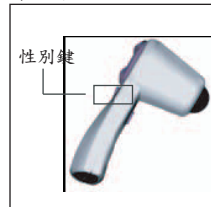


選擇性別時，男性則為不顯示
只有女性會作顯示
此外，將子宮切除的女性
必須選擇男性的模式進行測量

b) 塗上傳導膠或是傳導貼片



撕開傳導貼片或傳導膠

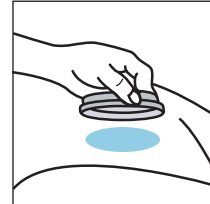


請將傳導膠或是傳導貼片
放置於恥骨上方(3公分處)



請將探頭放置於
傳導膠或貼片的位置

c) 瞄準膀胱位置

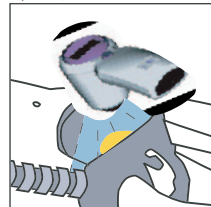

瞄準膀胱位置
將探頭朝向尾椎骨方向

d) 按下測量鍵



e) 確認測量結果



如有閃爍箭號，則需重新測量
請依照箭號方向，進行再次測量
如顯示未閃爍箭號
此測量數據也視為可接受



未顯示箭號，則為正確的數據
不需要再重複測量


2 進行語音紀錄

2A

測量後，持續按著性別鍵(約五秒鐘)，儀器會發出(嗶)的一聲
畫面也會跟著顯示出麥克風的圖示，就即可操作錄製語音紀錄


出現麥克風圖示後，仍需持續按著(性別鍵)，直到完成所有錄製

放開(性別鍵)後，儀器會播放一次剛剛所錄製的語音紀錄

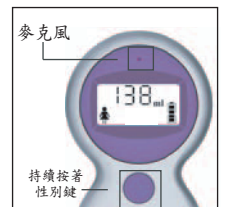

麥克風

持續按著
性別鍵

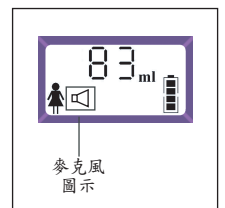

麥克風
圖示

2B

如果需要重新錄音，請重複步驟 2A

3

如果接受此語音紀錄，並想進行下一個測量，請返回步驟 1

4

如果畫面顯示紀錄已滿，則需將資料傳輸至 ScanPoint® 網站上



BVI 6400

TALENT



<http://www.talentmed.com.tw> <https://my.scanpoint.com>

台灣總代理：態能企業有限公司

臺北市新生北路三段七號12樓之三

TEL: (02) 2592-3920

BladderScan®, ScanPoint®, and Sontac® are registered trademarks of Diagnostic Ultrasound Corporation. All rights reserved.
For more information, call 800.331.2313 (in the U.S. and Canada) or contact your local Diagnostic Ultrasound representative.

0900-0956-01-60

BladderScan[®] 的使用限制

- ◎膀胱容量低估：病患具有相當程度疝氣(hernias)，大型憩室(diverticula)，或腸囊腫外科整形(enterocycloplasty)，其部份膀胱會超出掃描範圍，而無法包含在計算尿量之中。
- ◎膀胱容量高估：若鄰近膀胱位置有液體積聚，例如懷孕，或腹水(ascites)，卵巢的囊腫(ovarian cysts)，其液體容量會包含在計算尿量之中。
- ◎過度肥胖。
- ◎嚴重的腹部(恥骨上的)疤痕。
- ◎留置導尿管尚未移除前。
- ◎掃描部位正好有新撕裂傷口。