

BVI 9400 簡 易 操 作 卡

非侵入性、準確、可信賴且操作方便

1

按下電源開/關按鈕啟動 BladderScan® BVI 9400




2

選擇掃描模式

BladderScan BVI 9400 有三種掃描模式，針對病患的類型選擇對應的掃描模式，確保掃描的準確性；反覆的按壓模式按鈕來切換到需要的模式：

-  一般模式：受測者類型為男性及已切除子宮之女性。
-  女性模式：適用於一般女性(如子宮已切除之患者，請改選一般模式)
-  小童模式：適用於受測者身高不足48英吋(122 公分)以及體重不足60磅(27公斤)

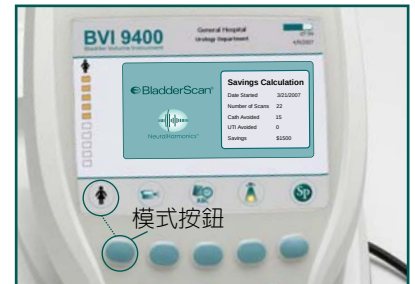

3

病患仰臥，塗上傳導膠

請受測者持仰臥姿勢，使腹部肌肉放鬆。
先找到受測者恥骨，在腹部中心距離恥骨上方約三公分處塗抹足量超音波傳導膠(盡可能減少氣泡)。



4

尋找膀胱

站於患者的右側，將探頭置於傳導膠上，並朝向膀胱位置瞄準，對多數患者大約是朝向尾椎骨的方向，如此可避免恥骨阻擋。



5

按下掃描鍵進行測量

掃描鍵分別於探頭下方及主機上都有，按下掃描鍵後即會進行測量。
掃描聲響結束後，即測量完成。




BVI 9400 簡 易 操 作 卡

非侵入性、準確、可信賴且操作方便

6

確認掃描

探測膀胱的位置必須完整地落在標靶十字準心的正中央，當探頭螢幕閃爍8隻箭頭，表示掃描完成不必再重新掃描。

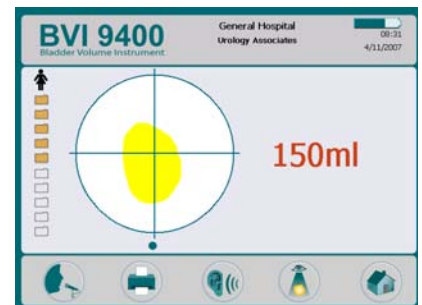

6a


重新掃描

若出現的箭頭指示符號，是固定不閃爍的，表示膀胱略微超出掃描範圍。如果掃描出的圖形，有出現閃爍的箭頭指示符號，表示未完整顯示膀胱，則探頭需依照箭頭指示方向調整，再次進行測量。如果主機畫面中未看到掃描的膀胱圖示，則必須重新尋找膀胱位置。

6b

重新瞄準


欲重新瞄準找尋膀胱時請注意在標靶“6點鐘”的位置下有顆小圓點，那代表為受測者的腳“12點鐘”的位置代表為受測者的頭，在左上方（9點鐘到12點鐘中間）表示為受測者的右肩。這定位應該能協助您重新找到完整的膀胱影像。

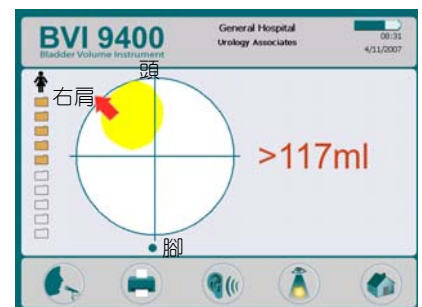

6c

恥骨

您可能於測量時在控制螢幕上看見恥骨被掃描到，如果發生此情況，您必須重新進行瞄準並重新掃描。雖然這膀胱影像有被掃描出來，但可能會有部分的膀胱有被恥骨遮蔽的可能性，故建議重新測量直到只顯示完整的膀胱影像。

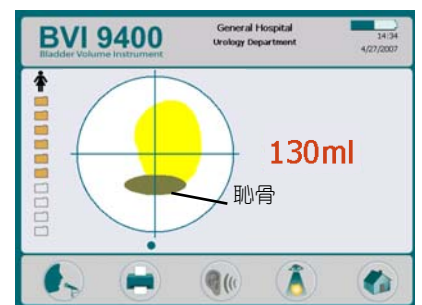

7

儲存、檢閱及列印掃描結果

儲存結果：必須語音記錄

如何語音紀錄：按下主機上的“錄音”按鈕，當開始錄音時，透過探頭上的麥克風說話，錄音結束按下“停止”按鈕完成錄音，之後可按下“收聽”按鈕收聽錄音。

檢閱紀錄：按下主機上的“檢閱”按鈕即可。（您必須將測量結果儲存後，才可檢閱）

列印：按下“列印”按鈕，即可列印測量報告。

進行其它筆測量：按下“主頁”選項即可進行其它筆的測量。



8

完成測量

完成測量後，先擦拭受測者及探頭上的超音波傳導膠。

可經由**ScanPoint**軟體，將所有的測量記錄上傳儲存於電腦。

欲訂購熱感紙或電池請與態能企業有限公司聯絡