

BVI 9400 簡 易 故 障 排 除 卡

非侵入性、準確、可信賴且操作方便

1

儀器無法啟動

若儀器無法啟動，通常是電池完全沒電，檢查螢幕右上角電量圖示，若電量圖示沒顯示的話，可以試著更換一顆有電的電池。


當電池電量偏低儀器仍可正常運作(電量太低不影響內部電路系統運作)但儀器會顯示下列訊息：
battery charge level is too low for instrument operation. recharge before next use.

既然如此，電池就必須充電或更換。

2

印表機常見問題：沒裝熱感紙

BladderScan BVI 9400會自動偵測紙夾是否有紙，當印表機缺紙時會顯示警告訊息如右圖。

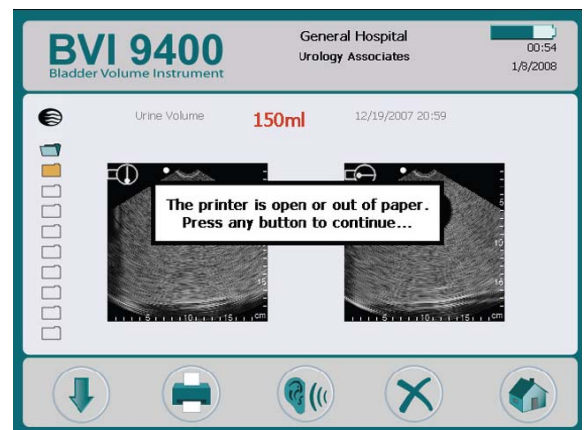

3

印表機常見問題：過熱

BVI 9400列印頭太熱會顯示TOO HOT的訊息，這樣的話請立即關掉BVI 9400，這也許會產生卡紙的結果，看到有卡紙在看以下内容。

4

印表機常見問題：清除卡紙

若印表機不能繼續往前送紙，請打開列印艙蓋後溫柔地取出卡紙，再從新放置熱感紙。

警告！若卡紙無法取出時，不要試圖拆卸印表機，請與Verathon代理商聯繫。