

簡易安裝操作指南

備註：要喚醒ScanPoint® 無線接收器的休眠模式，請按下並放開無線接收器上的按鈕。

1

從充電座內取出流速感應器

戴上手套並且使用握柄，從充電器內取出流速感應器，展開流速感應器的握柄並把它安置於馬桶上，如右圖。

流速感應器將發出嗶嗶聲，馬達會開始運轉，大約花費45秒鐘暖機。



2

放置漏斗於流速感應器

在流速感應器上安置漏斗，在握柄下把漏斗上的壓垂片扣上固定，讓漏斗保持在適當的位置。



3

準備開始測量，按下並放開在ScanPoint®無線接收器上的按鈕

確認流速感應器與接收器距離不超過10英尺；開始進行測量，請按下並放開無線接收器上的按鈕，當你從無線接收器上聽到唧唧聲，無線接收器上顯示一個“0”並且聽到流速感應器發出嗶嗶聲，這表示儀器已經準備好可以開始執行測量。



4

吩咐病患

請告知病患流速感應器每3秒會發出嗶聲，這是正常現象不必擔心，當病患開始解尿時，嗶嗶聲將停止。

吩咐病患放輕鬆後自然地 toward 漏斗解尿（僅能排尿），要求男性病患解尿時瞄準漏斗壁上的箭靶圖像。

將ScanPoint® 無線接收器置於不超過流速測定儀10英尺範圍內，（例如，在廁所裡的掛勾上，或是剛好在廁所門外），這距離不影響流速感應器與ScanPoint® 無線接收器彼此間的訊息傳遞，接收器將提供整個測量期間即時的數據。



5

測量結束，按下並放開在ScanPoint®無線接收器上的按鈕

當病患完成時，拿起ScanPoint® 無線接收器；按下並放開按鈕來結束測量，ScanPoint® 無線接收器LCD畫面將顯示總解尿量、最大流速及一個閃爍的麥克風圖像，指示儀器已準備好可以進行錄音。



錄音記錄迅速參考指南

6

注意：在繼續進行前，請務必詳閱步驟6與步驟7

記錄病患資訊時，按住ScanPoint®接收器上的按鈕

當記錄註記時，握著ScanPoint®接收器靠近你的嘴，按下並壓住按鈕直到你聽到嗶嗶聲。

當你在講話錄音的同時持續壓這枚按鈕，敘述包括相關測量訊息（例如病患姓名、年齡、性別、坐或站、操作醫護人員姓名等等），你有10秒鐘的時間記錄這些訊息。

放開按鈕並聆聽重播你錄音的記錄，播放完後你有5秒鐘的時間可再重新錄音。



7

確認錄音記錄

欲重新錄音，請按下並壓住按鈕再次重新建立新的錄音。

欲儲存你的錄音記錄時，需等待大概5秒鐘ScanPoint®無線接收器會自動地儲存錄音及測量結果。



8

使用ScanPoint®查看測量報告

放置ScanPoint®無線接收器於ScanPoint®傳輸座以查看FloPoint® Elite測量結果；輸入測量類型及必須的資料，傳送測量結果到ScanPoint®分析，然後查看FloPoint® Elite測量數據及圖表。



清潔流速感應器

1

徹底清潔流速感應器

把流速感應器掛在馬桶上清洗。

戴上手套，除去漏斗並適當的丟棄，用水沖洗馬桶除去任何尿液（不要沖洗漏斗）。

準備半加侖的清洗液：含非腐蝕性的清潔消毒液10%，不要使用任何有含氨的清潔產品，緩慢地把清潔液倒入流速感應器（若你倒入的太快，流速感應器的馬達也許會停轉），最後再次沖洗馬桶一次。



2

把流速感應器歸回到充電座

流速感應器從馬桶上移開，同時握住兩個握柄並將之從馬桶提起，瀝乾流速感應器後放回到充電座。



欲訂購專用漏斗 (0800-0274) 或校正液 (0800-0331)，請與態能公司聯絡 (02-2781-1915)